

# 2 Lubricación

Una vez terminado el proceso de limpieza, los motores y accesorios deben lubricarse por dentro.

Los aceites Sterilit® están especialmente concebidos para la lubricación de los motores Aesculap® y permitir su posterior esterilización.

## ¿Cómo lubricar el motor?

Dependiendo del tipo de motor se utilizará Aceite Sterilit® en Spray o el Aceite Sterilit® por goteo.

- Sterilit® en Spray:  
Introducir la boquilla del adaptador por el extremo del motor que corresponda y rociar durante 1-2 segundos.
- Aceite Sterilit® por goteo:  
Dejar caer en la entrada del motor 5 gotas y no olvidar lubricar también las partes móviles.

### 1. Aceite en spray Sterilit® GB600 para:

- 1 Piezas de mano micro-Line
- 2 Piezas de mano Hi-line y Hi-line XS
- 3 Motores HiLAN® / HiLAN® XS, Microspeed® EC, microspeed® uni y microspeed® arthro
- 4 Piezas de mano mini-Line

### 2. Aceite por goteo Sterilit® GA059 para:

- 1 Piezas de mano macro-line
- 2 Motores neumáticos Comfort
- 3 Motores de batería Acculan



Lubricación del motor Microspeed uni GB678 + Sterilit® GB600 con adaptador GB600820

Una vez lubricado se debe hacer funcionar el motor durante 20 segundos aproximadamente, cambiando varias veces el sentido de la marcha y eliminar el aceite sobrante con un paño que no deje pelusas.

## ¿Cómo lubricar las piezas de mano?

Para cada tipo de pieza de mano es necesario utilizar el aceite Sterilit® con su adaptador adecuado:

 GB600	 GB600810	Adaptador Micro para las piezas de mano Micro-Line	<b>Micro-Line</b> e.j:	 GB200 GB129	 GA 059	<b>Comfort-Line</b> e.j:	 GA437 GA430
	 GB600820	Adaptador Hi para las piezas de mano Hi-Line, Hi-Line XS y para los motores HiLAN® / HiLAN® XS, Microspeed® EC, microspeed® uni y microspeed® arthro	<b>Hi-Line</b> e.j: <b>Hi-Line XS</b> e.j:	 GB533r GB676 GB757R GB740R		<b>Macro-Line</b> e.j:	 GB115R GB120
	 GB600830	Adaptador Mini para las piezas de mano Mini-Line	<b>Mini-Line</b> e.j:	 GB390R GB382R		<b>Acculan</b> e.j:	 GA647
	 GB600840	Adaptador Acculan 3Ti					

- Introducir la boquilla del adaptador en posición vertical por el orificio de acople de las piezas de mano con el motor.
- Tapar con un paño que no deje pelusas el orificio donde se acoplan las puntas (brocas, fresas, etc..) y aplicar el spray durante 1-2 segundos. El spray a presión saldrá hacia fuera por las partes móviles y articuladas de las piezas.
- Si el color del aceite que sale es oscuro nos indicará que las piezas tiene mucha suciedad en el interior y que hay que volver a repetir el proceso de limpieza y lubricación.



*ej. lubricación del gatillo del taladro GB200 con Sterilit® M GA059*



*ej. pieza de mano angulada GD455M + Sterilit® adaptador GB600810*



*ej. Jacobs mini-line GB383R + Sterilit® GA059*



*ej. lubricación del interior del taladro micro-line GB200 con Sterilit® GB600 y adaptador GB600810*



*ej. lubricación del interior de la sierra oscilante micro-line GB129 con Sterilit® GB600 y adaptador GB600810*



*ej. lubricación del interior de la sierra mini-line GB390R con Sterilit® GB600 y adaptador GB600830*