



Instrucciones para cargar los Dardos TELINJECT®

Por favor lea estas instrucciones detenidamente. TELINJECT® no acepta ninguna responsabilidad por los daños del equipo, ocasionada por procedimientos inadecuados de manipulación.

Las regulaciones aplicables a su área sobre mantenimiento y la manipulación de armas, bienestar y protección animal, la manipulación de drogas médicas, debe cumplirse estrictamente.

Cuando se usan sustancias peligrosas, las instrucciones seguridad del fabricante de la droga deben añadirse y tenerse en cuenta.

Si el uso de este equipo es poco frecuente, nosotros le recomendamos, que debe usted practicar el procedimiento de carga y limpieza de los dardos con agua destilada, antes de usar las drogas necesarias.

La práctica repetitiva de la carga es la única solución, para una manipulación segura al realizar la operación en su uso real.

- 1- Quitar el estabilizador.
Si el dardo tiene presión, quitarlo con la varilla.
- 2- Mover el embolo de goma con la jeringa de 20cc con aire por medio del conector, un poco más que la cantidad necesaria para el volumen de la droga.
- 3- Tapar el agujero de la aguja especial con el tapón de silicona. Llene la jeringa con la cantidad de droga necesaria.
- 4- Traspasar la droga lentamente a la cámara de la droga con la jeringa pequeña. **La punta del dardo debe permanecer siempre seca y libre de grasa.** Pequeñas burbujas de aire en la cámara de droga son inofensivas.
- 5- Taponar la punta del dardo con la aguja y el protector y empujarlo firmemente en el cuerpo del dardo. Ahora con el dardo taponado, puede transportarse con total seguridad.
- 6- Cuando se tenga que usar, dar presión al dardo con la jeringa de aire y el conector. Mantener el dardo y la jeringa en posición vertical al aplicar el aire.
¡¡Importante: el tapón de cierre debe estar abajo!!.

El volumen de aire necesario para los dardos es de:

Dardo 0,6cc	5-7cc	Dardo 5cc	20-25cc
Dardo 1cc	7-10cc	Dardo 10cc	25-30cc
Dardo 2cc	13cc	Dardo 15cc	30-35cc
Dardo 3cc	20cc	Dardo 20cc	35-40cc

Atención: Los dardos tienen la presión adecuada, si el tapón posterior no se mueve, cuando damos vuelta al dardo.

- 7- Montar el estabilizador firmemente al final del dardo con un movimiento giratorio. Quite el protector de seguridad. El dardo esta preparado ahora para el disparo.

INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE DARDOS + AGUJAS TELINJECT®

Los dardos, que usted ha comprado han sido diseñados para un uso repetido. Sin embargo para tener en perfectas condiciones de uso, todos los componentes, algún tipo de mantenimiento se requiere.

- Por favor tenga presente los consejos siguientes:
- Después del uso, enjuagar con la agua esterilizada y desinfectar la cámara de droga (¡¡pero no la cámara de aire!!). Quitar cualquier resto de agua dentro de la cámara de la droga dándole presión al dardo varias veces.
- Empuje la embolo de goma hacia adentro todo lo posible, con la ayuda de la jeringa y el conector de aire y de la varilla. Use la jeringa y aguja desechable para poner 1 o 2 cm de aceite de silicona (suministrado) en la cámara de la droga y distribuir regularmente girando el dardo. También agite el dardo de atrás a adelante.
- Almacene los dardos vacíos, sin presión con el estabilizador, a humedad y temperatura normales. Con poca humedad el material se seca con la correspondiente pérdida de elasticidad.
- Limpiar de la misma forma las jeringas y agujas de carga de los dardos. Quitar el agua sobrante de las agujas con la jeringa de 20 cc de aire



NIF: A-81486797

**GRUPACER
CERCAMPO, S.A.**

Tél.: 902 013 122 - Fax: 91 356 61 01
E-Mail: grupacer@grupacer.com
Web: www.grupacer.com

Instrucciones de carga de los Dardos Telinject®

